



衛署醫器製字第 001706 號  
認可登錄號碼 GMP0314

型號

○ TM-328

○ TM-329

電壓

220V

使用說明書

SPEEDY AUTOCLAVE  
INSTRUCTION MANUAL 2023/V1


# 消毒步驟

1. 插上插頭 (如圖1) · 接妥排水管 (如圖2)。

圖1




圖2

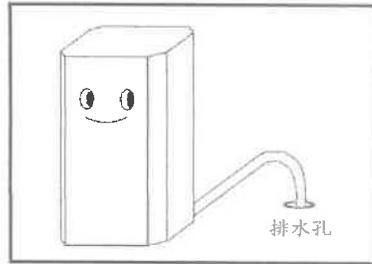

2. 打開門蓋 (將門蓋把手逆時針轉鬆，轉鬆後把手向左推，如圖3)。

圖3

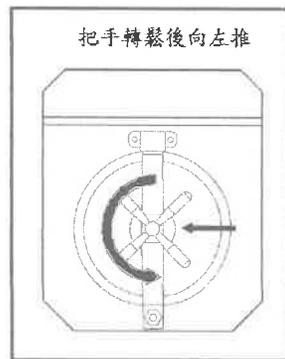

3. 關上排氣開關 (順時針方向鎖緊，如圖4) · 排水開關 (順時針方向鎖緊，如圖5)。

圖4


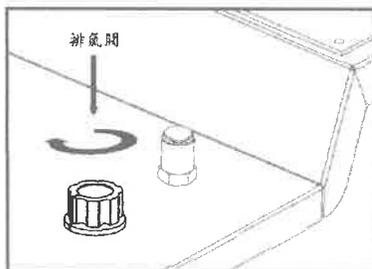


圖5

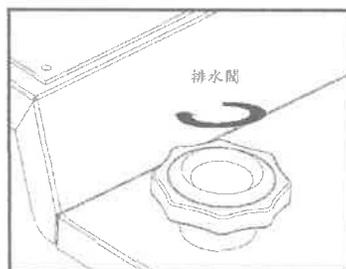


# 消毒步驟

4. 先放底墊，再加蒸餾水或過濾水到內桶中 ( TM-328：加入約2500cc.，TM-329：加入約3000cc.公升 )，底墊上見水即可。之後把欲消毒物品放入消毒網籃，再把網籃放入桶裡 ( 如圖1 )。※可依需求選購單層或雙層網籃或實心桶。


以蒸餾水(純水)需蓋過底墊為標準。  
務必確認鍋內的水量，避免空燒而發生意外

圖1

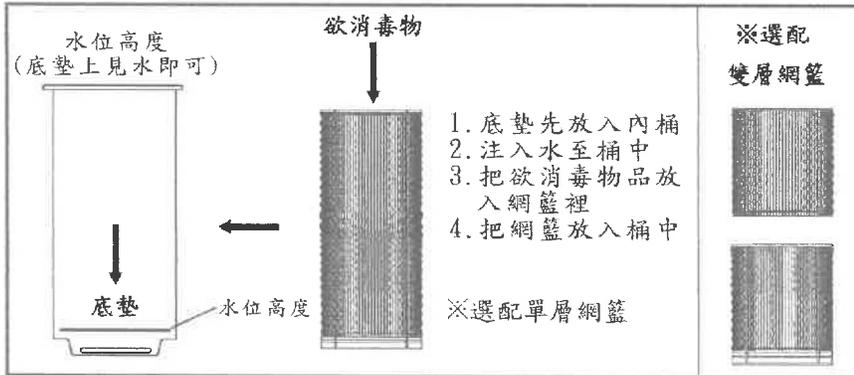


5. 將門蓋鎖緊 ( 將門蓋推回中間頂住，把手順時針轉緊，如圖2 )。

圖2

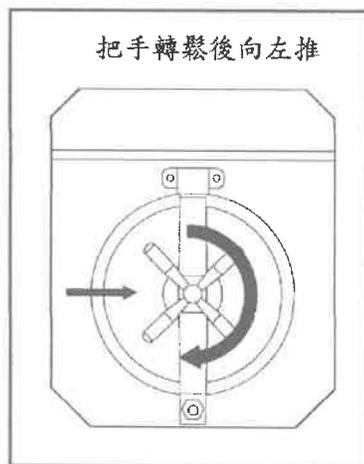

# 消毒步驟

6. 開啟電源開關，打開消毒開關（向左切），如圖1。

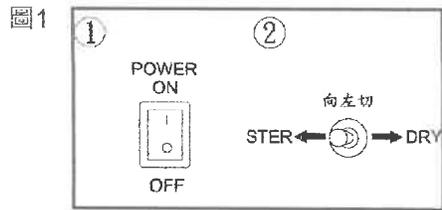


7. 將定時器設定時間為30分鐘（如圖2），之後按下START啟動開關啟動（如圖3）。（當壓力到達1.2 KG/cm<sup>2</sup>時，定時器啟動指示燈會亮起才開始計時，並且定時器內部採用數位計時，所以定時器指針在計時中不會回歸零點），消毒過程所需時間大約50~55分鐘。

圖2




圖3

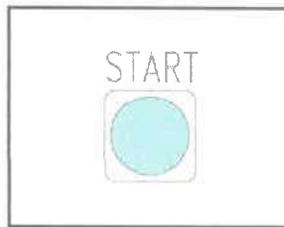

8. 消毒完成時，警報響約30秒並自動切斷電源，檢查排水管是否固定，等警報響完後壓力仍大，請務必緩慢打開排水閥（逆時針轉約20°~45°左右，如圖4），將餘水排出，此時壓力錶會慢慢下降，『待壓力歸零』後請馬上乾燥，如不乾燥請關閉電源。\*壓力未歸零打開門蓋時蒸氣會從門蓋旁噴出，容易發生危險，請務必讓壓力歸零後再開啟門蓋。

圖4

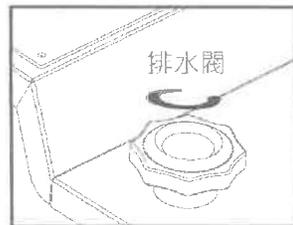

9. 本高壓滅菌鍋不執行乾燥功能，因此高壓滅菌完成後，待壓力歸零且降溫後，請取出滅菌後的物品。若物品需要烘乾，請放置到滅菌鍋左側的恆溫乾燥箱，進行乾燥。

10. 滅菌後，請將排水閥、排氣閥鬆開，並將出水孔排出之廢水清理乾淨。

## 注意事項:

1. 滅菌前務必確定水位。
2. 開門前務必確定內鍋壓力錶已歸零
3. 隨時保持鍋內清潔，以延長使用年限。
4. 除了滅菌結束的響聲外，其餘的響聲皆視為不正常響聲，若有這種情形，請依下列步驟處理：
  - (1) 立即關閉電源。
  - (2) 檢查水位是否過低。
  - (3) 排氣閥、排氣閥是否開著。
  - (4) 其餘的原因，請通知該實驗室負責老師或其他人員。